

Gebruiksaanwijzing zolen in veiligheidsschoenen

- Onze zolen zijn maatwerk en in hoogte en lengte gemaakt op de maat van de voeten in combinatie met noodzakelijke lengte toegift[#]
- Haal de origine zolen uit de werkschoenen
- Leg de door ons geproduceerde zolen in de werkschoenen, zorg dat ze aan de achterzijde goed aansluiten en wrijf de teenpartij goed plat door tot aan de neus van de werkschoen
- Haal de zolen absoluut niet meer uit de veiligheidsschoenen, zo wordt beschadiging van de zolen voorkomen en kunnen ze er ook niet verkeerd terug ingelegd worden.
- Laat de zolen niet bij de kachel, verwarming of andere hete plaatsen drogen.
- Smeer de zolen niet in met een crème of andere middelen.
- Het is niet nodig om de zolen schoon te maken.
- Indien problemen neem dan meteen contact op met ons info@vanbakelpodotherapie.nl of op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 046-4588228 wij kijken graag naar het probleem en eventuele mogelijke oplossingen^{*}



van Bakel Podotherapie

[#] Deze lengte toegift is noodzakelijk omdat de voet bij afwikkelen extra ruimte in de schoen nodig heeft om de zool optimaal te laten functioneren

^{*} Eerste 2 maanden 100% gratis